


Hengityksensuojaimen pukemisohje

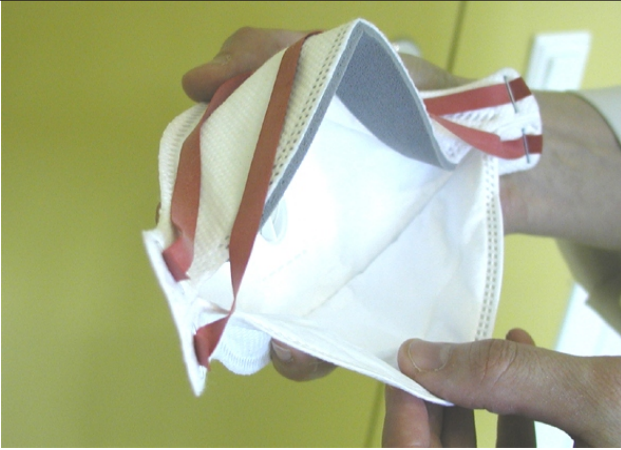

1 Muotoile nenäpehmuste taivuttamalla keskikohdasta varovasti. Avaa alaosa niin, että suojaimesta tulee kuppimainen.



2 Käännä hengityksensuojain siten, että nauhat roikkuvat alaspäin.



3 Aseta hengityksensuojain kasvoille ja vedä kiinnitysnauhat pään yli.



4 Laita alempi nauha korvien alapuolelle ja ylempi nauha päälaelle. Säädä ylä- ja alaosan istuvuus.



5 Muotoile molemmilla käsillä nenäpehmuste tiiviisti nenän muotoon.



6 Tarkasta hengityksensuojaimen tiivys hengittämällä sisään voimakkaasti. Jos tunnet ilmvirtausta nenän ympärillä, muotoile nenäpehmustetta uudelleen. Jos tunnet ilman virtausta muualta suojaimen reunoilta, asettele nauhat uudelleen.